

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO DEL CONCENTRADOR DE OXÍGENO

AL RECIBIR EL EQUIPO, LE SERÁN ENTREGADOS:

- 1 CONCENTRADOR DE OXÍGENO
- 1 VASO HUMIDIFICADOR DESECHABLE
- 1 PUNTAS NASALES DESECHABLES

ANTES DE PONER EN MARCHA EL CONCENTRADOR, REALICE LAS SIGUIENTES ACCIONES:

1. DESENROSQUE LA TAPA DEL VASO Y LLENE CON AGUA PURIFICADA SOLAMENTE, HASTA UN MÁXIMO DE $\frac{3}{4}$ DEL VASO HUMIDIFICADOR. NO SOBRELLENE EL VASO.
2. CIERRE EL VASO HUMIDIFICADOR ROSCANDO LA TAPA CORRECTAMENTE.
3. COLOQUE EL VASO HUMIDIFICADOR EN EL CENTRO DEL CONCENTRADOR, ROSCANDO EN EL TORNILLO SUJETADOR DEL APARATO Y DE LA TAPA DEL VASO.
4. INSERTE LAS PUNTAS NASALES AL VASO HUMIDIFICADOR EN LA VÁLVULA DE SALIDA.
5. CONECTE EL CABLE DE PODER DEL CONCENTRADOR A LA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 110V. NO SE RECOMIENDA EL USO DE CLAVIJAS MÚLTIPLES PARA CONECTAR EL CONCENTRADOR DE OXÍGENO A LA CORRIENTE ELÉCTRICA.

PUESTA EN MARCHA DEL CONCENTRADOR:

1. ASEGURESE QUE LA PERILLA DE FLUJO DE OXÍGENO ESTA COMPLETAMENTE CERRADA.
2. PULSE EL BOTÓN DE "ENCENDIDO" (ON). SE ACTIVARÁ UNA ALARMA DURANTE UNOS SEGUNDOS Y SE ENCENDERÁ UN FOCO DURANTE ESE LAPSO.
3. CUANDO LA ALARMA SE HAYA APAGADO, PODRÁ INICIAR EL PASO DE OXÍGENO, DANDO VUELTA A LA PERILLA Y VIGILANDO QUE EL BALIN DE FLUJO SUBA AL VOLUMEN DESEADO.
4. UNA VEZ QUE HAYA ALCANZADO EL VOLUMEN DESEADO, COLOQUE AL PACIENTE LAS PUNTAS NASALES.
5. SI LA ALARMA PERSISTE, LLAME AL PROVEEDOR PARA RECIBIR INDICACIONES.

APAGANDO EL CONCENTRADOR:

1. ANTES DE APAGAR COMPLETAMENTE EL CONCENTRADOR DE OXÍGENO, DEBERÁ RETIRAR LAS PUNTAS NASALES DEL PACIENTE.
2. CIERRE COMPLETAMENTE EL FLUJO DE OXÍGENO, VIGILE QUE EL BALIN BAJE COMPLETAMENTE HASTA EL CERO (0).
3. APAGUE EL EQUIPO PRECISIONANDO EL BOTON DE ENCENDIDO/APAGADO.
4. DESCONECTE EL EQUIPO DE LA TOMA DE CORRIENTE ELÉCTRICO MIENTRAS NO SE PONGA EN MARCHA.

ASISTENCIA TÉCNICA: +52 1 442 3431713



gerencia@enfermerasgro.com

